




# PROTEJA SU AUDÍFONO

Sudor | Suciedad | Humedad | Pérdidas | Ruido del viento



[www.gearforears.com](http://www.gearforears.com)

## GUÍA DE MEDIDAS

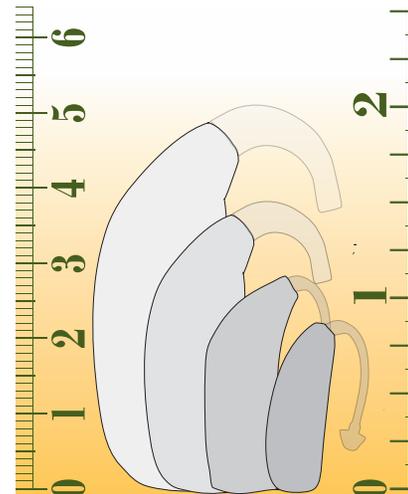

Cm pulg.  
Coloque la base del audífono en el cero y mida hasta la parte superior de la curva.

## GUÍA DE TAMAÑOS

### Ear Gear Micro

Hasta 1 pulg. / hasta 2.5 cm

### Ear Gear Mini

De 1 a 1.25 pulg. / De 2.5 a 3.2 cm

### Ear Gear Original

De 1.25 a 2 pulg. / De 3.2 a 5 cm

### Ear Gear FM

De 2 a 3 pulg. / De 5 a 7.6 cm

### Cochlear, Rondo y Baha

Modelo genérico para la mayoría de los tamaños

### ITE

Sistema de seguridad con broche y gancho



## TAN FÁCIL COMO...

1.

Utilizar la Guía de medidas para elegir el modelo según el tamaño de su aparato.

2.

Elegir las opciones  
- Color  
- Con cable  
- Sin cable  
- Mono  
- Anteojos

3.

PEDIR SU EAR GEAR



## Instrucciones para la instalación de Ear Gear

### Ear Gear Micro, Mini, Original y FM

Retire el auricular o el molde auricular del audífono.

Inserte el gancho del audífono o tubo en la abertura grande de Ear Gear hasta que salga por la abertura más pequeña.

Vuelva a sujetar el auricular o molde auricular

Si su Ear Gear es un modelo con cable, sujete el clip en la ropa.

### Rampa coclear de Ear Gear

Inserte el extremo del gancho del audífono del procesador de la rampa coclear por la abertura extensa de la funda de Ear Gear hasta que salga por la abertura más pequeña en la parte superior de la funda de Ear Gear.

Deslice el Ear Gear por el cuerpo del procesador hasta que el fondo del procesador quede incrustado firmemente en la funda de Ear Gear

Si su Ear Gear es un modelo con cable, sujete el clip en la ropa.

### Ear Gear Rondo

Inserte el Rondo en la abertura en la funda de Ear Gear. Cubra completamente el Rondo.

Si su Ear Gear es un modelo con cable, sujete el clip en la ropa.

### Ear Gear Baha

Inserte el Baha en el extremo de la abertura de Baha Ear Gear y empuje la protuberancia plástica a través del orificio en Baha Ear Gear.

Si su Ear Gear es un modelo con cable, sujete el clip en la ropa.

### Anteojos Ear Gear

Cuando el audífono ya esté insertado en la funda de Ear Gear, deslice la montura de los anteojos por el (los) anillo(s) en forma de O.

Tenga en cuenta que algunos modelos de anteojos de Ear Gear tienen un anillo en forma de O y otros tienen dos anillos en forma de O. Utilizar uno o ambos anillos en forma de O es opcional.

Si su Ear Gear es un modelo con cable, sujete el clip en la ropa.

### Ear Gear ITE


Abra el broche con resorte y sujételo a la argolla en el procesador.

Sujete el clip en la ropa.

## Cómo usar el cable y el clip de Ear Gear

Levante la lengüeta hasta que las horquillas del clip estén completamente abiertas. Coloque el clip en el cuello y empuje la lengüeta hacia abajo hasta que el clip se bloquee.

Deslice el anillo en forma de O hacia la cabeza para asegurar y ajustar los cordones más hacia la cabeza.

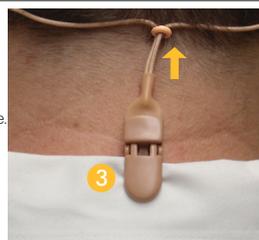

# CALIFICADO COMO EL N.º 1

EN UNA ENCUESTA DE 286 PADRES,  
LLEVADA A CABO POR LAS AUDIÓLOGAS  
**DRA. KAREN ANDERSON Y DRA. JANE  
MADELL**, EAR GEAR ESTUVO  
CALIFICADO COMO EL N.º 1 EN  
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA  
AUDÍFONOS.

## Para todas sus necesidades de estilo de vida

Ear Gear es una funda de lycra de doble pared acústicamente transparente y resistente al agua que mejorará radicalmente la experiencia con su audífono ya que protege su aparato del sudor, la suciedad, la humedad, las pérdidas y el ruido del viento. El material suave de lycra hace que los audífonos sean más cómodos para usar, evita irritaciones y previene el daño en los micrófonos ocasionado por obstrucciones y baterías corroídas. Ear Gear es la solución perfecta para niños y bebés, y les brinda tranquilidad a los padres preocupados. Además, es justo lo que el médico prescribió para niños en edad escolar activa, en el patio

o en el hogar. A las personas adultas también les encanta Ear Gear, lo utilizan en entornos de trabajo sucios, polvorientos o húmedos. Ear Gear es la elección correcta para trabajar en el jardín, mientras corta el césped o durante cualquier tipo de actividad deportiva o al aire libre, como correr, andar en bicicleta, hacer caminatas o pescar. Ear Gear les da tranquilidad a los adultos mayores gracias a que los audífonos siempre pueden ser localizados. Esto hace que Ear Gear sea indispensable para cualquier residente de un centro para personas de la tercera edad.

## Sí, Ear Gear funciona para todos.



¡Ear Gear ITE nos ha salvado la vida! El cordón con el clip de fijación le sirve al personal de atención domiciliaria de mi madre para seguir el rastro de los audífonos. Anteriormente, los encontraron sin funcionar en la secadora de ropa. Lo mejor de todo es que mi mamá nuevamente puede oír.

- Diane Stepaniuk



Recientemente, participé en una caminata por un sendero realmente frondoso, Ear Gear me evitó perder mis audífonos en al menos 3 oportunidades cuando por unas ramas húmedas se me cayó el audífono del oído. ¡Ear Gear me da tranquilidad!

- John Young



Me encanta usar Ear Gear porque me ayuda a proteger mis audífonos del sudor mientras practico deportes. ¡Gracias por crear este producto tan importante y efectivo!

- Brady Gudauskas



Con Ear Gear ya no tenemos que preocuparnos de que Zoe pierda sus audífonos. Ahora, ella puede usarlos durante todo el día, independientemente de dónde esté o con quién esté.

¡Gracias por hacer un producto tan fabuloso, elegante e innovador!

- Zoe Clarin



Voy a la playa todos los fines de semana y, en el pasado, me preocupaba de que la arena y el aire salado afectaran mis audífonos. ¡Ya no! Recomiendo mucho Ear Gear por la protección que proporciona independientemente de que esté trabajando en el exterior, bailando o yendo a la playa. Ear Gear es una inversión que indudablemente vale mucho la pena.

- Stephanie League



Utilizo Ear Gear todo el tiempo; al pescar, al navegar en la lluvia, con fuertes vientos y en cualquier tipo de clima sin ningún problema. Ear Gear contribuyó enormemente a mi calidad de vida, y ahora disfruto de cualquier deporte sin preocupaciones.

- Dermot O'Brien